



Fabriqué par
MRP
à Ambert (63)
Auvergne-Rhône-Alpes

MASQUE GRAND PUBLIC

COVID 19

MASQUE CATEGORIE 1 - UNS 1 (filtration supérieur à 90%)

Tester par la DGA rapport n° RP/20-4050

Conforme aux prescriptions AFNOR SPEC S76-001

Réutilisable et tester pour 20 lavages

DOMAINE D'UTILISATION

Nos masques sont réservés à des usages non sanitaires de catégorie 1 (UNS1) selon la note d'information du 29 mars 2020. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Il n'est pas destiné à être utilisé par le personnel soignant au contact des patients.

COMPOSITION / SECURITE

Ils sont composées de 3 couches permettant filtration, respirabilité et grand confort :

- * couche externes : maille polyester respirant 150 gm2 garantissant une bonne respirabilité et une très grand résistance au lavage.
- * couche interne : non tissé polyester 50gm2 permettant une filtration optimale
- * bordure : galon polyester / élasthane offrant un grand confort d'utilisation.

Ces matériaux ont été mesurées par les laboratoires de DGA rapport RP/20-4050/DGA MNRBC/2000305/NP et supportent 20 lavages rapport 2020-04-29-075-1

Ce masque a démontré une **efficacité de filtration de 91%** pour des particules émises de 3 microns.

La **respirabilité** (La perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa) de ce masque a été mesuré à **514 L.m2.s-1** (pour une norme à 96).

Le design a été établi par notre modéliste et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Ce masque a entièrement été **fabriqué en France** dans notre atelier d'Ambert (63)



Les caractéristiques du masque ont été testées par l'IFTH (rapport 2020-04-29-075-1) et sont garanties pour résister à un cycle de **20 lavages**.

TAILLES

XS : 3 à 8 ans
S : 9 à 13 ans
M : Femme et adolescent
L : Homme
XL : Homme large

NOTICE D'UTILISATION

Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.

- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.



COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique. Inspectez le masque et assurez vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

Tenez le masque par les lanières élastiques. Placez-le au niveau de votre bouche. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

Évitez de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

Quand vous avez porté le masque 4h. Quand vous souhaitez boire ou manger. Quand il devient difficile de respirer. Si le masque s'humidifie. Si le masque est endommagé. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Afin de préserver toutes ses caractéristiques, conservez-le à une température comprise entre -2°C et + 55°C et dans une humidité maximale de 75%.

Pour le lavage :

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 minutes à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique. Ce masque a été testé pour 20 lavages.

Après le lavage :

Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté. Repassez votre masque à une température de 120°C. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

BLEU BLANC MASQUES est une marque du groupe MRP

2 rue costes et Bellontes - 63600 Ambert - 04 73 82 08 18 - contact@bleublancmasques.fr